

SILVERIN® STICKS 50%

Silvernitratsticka/Caustische stiften met zilvernitraat

Medicin-teknisk produkt/Medisch product

LÄS NOGA IGENOM DENNA BIPACKSEDEL INNAN DU ANVÄNDER DEN.

Använd alltid denna medicin-tekniska produkt exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare. Vänd dig till din läkare om du behöver mer information, råd eller vid biverkningar. Om ingen förbättring sker eller om försämring uppstår kontakta din läkare.

INNEHÅLL I DENNA BRUKSANVISNING:

1. Vad är SILVERIN® Silvernitratsticka och vad används de för?
2. Vad du behöver veta innan du använder SILVERIN® Silvernitratsticka?
3. Hur använder du SILVERIN® Silvernitratsticka?
4. Vilka biverkningar kan förekomma?
5. Hur förvaras SILVERIN® Silvernitratsticka?
6. Förpackningens innehåll och ytterligare upplysningar

1. VAD ÄR SILVERIN® SILVERNITRATSTICKA OCH VAD ANVÄNDS DE FÖR?

Silvernitrat har i låg koncentration en bakteriedödande effekt och är i hög koncentration frätande och sårbildande. Kaliumnitratets uppgift är att minska silvernitratets koncentration så att lösningen blir mildare. Denna blandning är placerad på en pinn, som på ett tändstickshuvud, och är klar för engångsbruk man har fuktat huvudet med vatten. Detta möjliggör en exakt behandling av det område man vill behandla.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER:

Till vårtor, fissurer, aphos stomatitis och som blodstillare av yttlig blödning samt vid näsblödning. Den kan också användas för att avlägsna överskott av vävnadstillväxt (svallkött) som kan uppstå vid läkning av hudsår. Navelsträngsrester kan avlägsnas med SILVERIN® Silvernitratsticka, något som utförs av läkare eller barnmorska.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SILVERIN® SILVERNITRATSTICKA?

Silvernitratstickan får inte användas om du är allergisk mot silvernitrat eller kaliumnitrat.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET:

- Vid hudförändringar som är ovanliga i färg eller form och som inte kan identifieras som granulatsvinnad eller som vanliga vårtor bör SILVERIN® STICKS endast användas under kontroll av läkare.
- Rör inte på SILVERIN® STICKS topp (etsmedel) med våta händer.
- Skydda dina kläder och andra föremål när du hanterar silvernitratstickan.
- Silvernitrat leder till brunsvarta fläckar och dessa kan inte avlägsnas med vanliga rengöringsmedel.
- Om frisk hud oavsiktligt kommit i kontakt med silvernitratstickan: Håll under rinnande vatten och rengör med en tvättsvamp. Det kan fortfarande leda till att dessa hudområden blir mörka men detta är ofarligt. De mörka områdena bleknar efter ca 10-14 dagar.
- Om silvernitratstickan kommit i kontakt med ögat: Håll genast det öppna ögat under rinnande vatten i minst 5 minuter, kontakta därefter läkare.
- Vid användning runt munnen och i munhålan är det mycket viktigt att se till att inga delar av toppen sväls.

BARN: Användning på barn under 3 år bör endast ske efter kontakt med läkare.

ANDRA LÄKEMEDEL I KOMBINATION MED SILVERIN® SILVERNITRATSTICKA:

Det finns inga kända interaktioner mellan andra läkemedel och SILVERIN SILVERNITRATSTICKA.

GRAVIDITET OCH AMNING:

Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att få barn, rådgör med läkare innan du använder denna medicin-tekniska produkt.

BILKÖRNING:

Användning av SILVERIN® Silvernitratsticka påverkar inte kör förmågan.

3. HUR ANVÄNDER DU SILVERIN® SILVERNITRATSTICKA?

Använd alltid denna medicin-teknisk produkt exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel. Om du är osäker, fråga din läkare.

REKOMMENDERAD DOSERING:

Behandla endast små hudområden i taget.

TYP AV ANVÄNDNING:

För utvärtes bruk. Förbered huden du vill behandla så den är ren. Fukta silvernitratstickans topp genom att fukta den med vatten. Toppen får då en vit eller något ljusgrå färgton och är nu klar för användning. Badda eller stryk stickan på området som ska behandlas noggrant och jämnt. Det behandlade området blir snabbt svart och stöts sedan bort efter ett par dagar. Upprepa behandlingerna varannan eller var tredje dag tills önskat resultat uppstår. Stickorna är endast avsedda för engångsbruk.

OM MAN ANVÄNDER PREPARATET FÖR OFTA:

Om man använder preparatet för ofta (utan att invänta förbättring) så kan stickorna orsaka irritation eller inflammatoriska reaktioner i området runt om det behandlade området. I sådana fall kontakta läkare för konsultation.

4. VILKA BIVERKNINGAR KAN FÖREKOMMA?

Det kan förekomma överkänslighetsreaktioner eller lokal hudirritation, såsom klåda, rodnad, blåsor eller en mild brännande känsla. Om du märker några biverkningar, kontakta din läkare. Detta gäller även biverkningar som inte anges i bipacksedeln.

5. HUR FÖRVARAS SILVERIN® SILVERNITRATSTICKA?

Förvara i originalförpackningen för att skyddas mot ljus. Förvara förpackningen torr. När förpackningen öppnats täta med tejp tills nästa användning. Förvara utom syn- och räckhåll för barn. Du får inte använda denna medicin-tekniska produkt efter utgångsdatum. Utgångsdatumet finns på förpackningens baksida. Kasta inte denna produkt i hushållsavfall. Fråga ditt apotek hur man kasserar produkten när du slutar använda den. Du bidrar således till att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH YTTRELLIGARE UPPLYSNINGAR:

Paketet består av 10 st silvernitratstickor av trä (stel) eller plast (flexibel) med rund aktiv substansstopp med 50% silvernitrat och 50% kaliumnitrat i ett lusskyddat plasthölje.

FÖRPACKNINGSTORLEK:

Finns i följande förpackningsstorlekar:
10 st 115 mm långa och 10 st 200 mm långa
SILVERIN® Silvernitratsticka finns i varianterna flexibel och stel.

TILLVERKARE:

BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Österrike, www.bano-healthcare.at.
Rösch & Handel är ett varumärke av BANO Healthcare GmbH.

DENNA BIPACKSEDEL ÄNDRADES SENAST: JULI 2018

LEES VOOR GEbruik A.U.B. DE GEbruUKSINFORMATIE ZORGvULDIG DOOR.

Gebruik dit medisch product altijd precies zoals beschreven in de bijsluiter respectievelijk exact volgens de instructies van uw arts of apotheker. Raadpleeg uw apotheker als u meer informatie of advies wenst of bijwerkingen opmerkt. Wanneer er na herhaaldelijk gebruik geen verbetering optreedt of er zelfs sprake is van verslechtering, neem dan contact op met uw arts.

INHOUD VAN DE GEbruUKSAANvUJZING:

1. Wat zijn SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Waar moet u vóór het gebruik van SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat op letten?
3. Hoe moeten SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat worden gebruikt?
4. Welke bijwerkingen kunnen er optreden?
5. Hoe moeten SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat worden bewaard?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

1. WAT ZIJN SILVERIN® CAUSTISCHE STIFTEN MET ZILVERNITRAAT EN WAARVOOR WORDEN ZE GEbruUKT?

Zilvernitraat heeft in kleine concentraties een bacteriedödende werking, in hoge concentraties werkt het korstvormend en bijtend. Kaliumnitrat wordt gebruikt als verdunningsmiddel zodat de reactie van het zilvernitraat milder is. Het mengsel is net als bij een lucifer op een staafje aangebracht en na bevochtiging gereed voor eenmalig gebruik. Dit medisch product maakt een puntsgewijze hantering mogelijk zodat de werking ervan tot nauwkeurig afgebakende plaatsen beperkt blijft.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Voor de behandeling van wratten en huidwoekeringen, bij kloven, bij afteuze stomatitis, voor bloedstelping bij oppervlakkige bloedingen en neusbloedingen.

2. WAAR MOET U VÓÓR HET GEbruik VAN SILVERIN® CAUSTISCHE STIFTEN MET ZILVERNITRAAT OP LETTEN?

De caustische stiften met zilvernitraat mogen niet worden gebruikt als u allergisch bent voor zilvernitraat of kaliumnitrat.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:

- Bij alle ongewoon verkleurde of ongewoon gevormde huidveranderingen die niet eenduidig als 'wild vlees' of als gewone wratten herkenbaar zijn, mogen de SILVERIN® STICKS alleen onder toezicht van een arts worden gebruikt.
- Raak de tip (etsmiddel) van de SILVERIN® STICKS niet met vochtige handen aan.
- Bescherm uw kleding en andere voorwerpen tijdens het gebruik van de caustische stiften.
- Zilvernitraat veroorzaakt bruinzwarte vlekken die met gangbare reinigings- of wasmiddelen niet kunnen worden verwijderd.
- Gezonde huid die onbedoeld met de tip van de caustische stift in aanraking komt, moet zorgvuldig met stromend water en een spons worden gereinigd. Ondanks kan er sprake zijn van een ongevaarlijke donkere verkleuring van deze huidplekken. De donkere verkleuring verbleekt na ongeveer 10-14 dagen weer.
- Wanneer de caustische stift met het oog in aanraking is gekomen, onmiddellijk met geopend ooglid minimaal 5 minuten onder stromend water spoelen en daarna een arts raadplegen.
- Bij gebruik rond de mond dient u erop te letten dat er geen delen van de tip worden ingeslikt.

KINDEREN: Gebruik bij kinderen jonger dan 3 jaar mag alleen na individueel advies van een arts.

WISSELWERKINGEN: Er zijn geen wisselwerkingen bekend.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:

Als u zwanger bent, borstvoeding geeft, vermoedt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, dan dient u vóór gebruik van dit medisch product uw arts of apotheker te raadplegen.

RJVAARDIGHEID:

Het gebruik van SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

3. HOE MOETEN SILVERIN® CAUSTISCHE STIFTEN MET ZILVERNITRAAT WORDEN GEbruUKT?

Gebruik dit medisch product altijd precies zoals beschreven in de bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

AANBEVOLEN HOEVEELHEID:

Behandel altijd uitsluitend kleine gedeeltes van de huid.

TOEDIENINGSVORM:

Voor uitwendig gebruik. Bestendige, schone onderlegger klaarleggen. Te behandelen plaats reinigen. Tip van de caustische stift bevochtigen door deze even onder druppelend water houden. De tip wordt hierdoor wit of lichtgrijs en is nu gereed voor gebruik. De betreffende plaats meerdere malen nauwkeurig en gelijkmatig betten of bestrijken. De behandelde plek verkleurt binnen korte tijd zwart en zal in de komende dagen door het omliggende weefsel worden afgestoten. Herhaal de behandeling om de 2-3 dagen totdat het gewenste resultaat is bereikt. De stiften zijn voor eenmalig gebruik.

BIJ OVERDOSERING VAN DE SILVERIN® CAUSTISCHE STIFTEN MET ZILVERNITRAAT:

Excessief gebruik (zonder te wachten op verandering) kan rond de behandelde plaats tot irritaties of ontstekingsreacties leiden. In dergelijke gevallen dient u vóór verder gebruik uw arts te raadplegen.

4. WELKE BIJWERKINGEN KUNNEN ER OPTREDEN?

Er kan sprake zijn van overgevoelheidsreacties of lokale irritaties van de huid zoals jeuk, rode verkleuringen, blaasjes of een licht brandend gevoel. Als u bijwerkingen opmerkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan vermeld.

5. HOE MOETEN SILVERIN® CAUSTISCHE STIFTEN MET ZILVERNITRAAT WORDEN BEWAARD?

Graag in de originele verpakking bewaren om de inhoud tegen licht te beschermen. Bewaar de verpakking op een droge plaats. Sluit de verpakking na opening tot het volgende gebruik zorgvuldig met plakband. Bewaar dit medisch product buiten bereik van kinderen. U mag dit medisch product na afloop van de vervaldatum niet meer gebruiken. De vervaldatum staat op de achterkant van de verpakking vermeld. Verwijder dit product niet via het gewone huisvuil. Vraag aan uw apotheker hoe u het product kunt verwijderen als u het niet meer gebruikt. Hiermee levert u een bijdrage aan het milieu.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN AANvULLENDE INFORMATIE:

De verpakking bestaat uit 10 caustische stiften van beukenhout (stijf) of kunststof (elastisch) met ronde tip met daarop een werkzaam mengsel van 50% zilvernitraat en 50% kaliumnitrat in een tegen licht beschermende kunststof huls.

VERPAKKINGSMATEN:

Verkrijgbaar in de volgende verpakkingmaten:
10 st. met een lengte van 115 mm en 10 st. met een lengte van 200 mm
De SILVERIN® caustische stiften zijn in de varianten elastisch en stijf verkrijgbaar.

FABRIKANT:

BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Oostenrijk, www.bano-healthcare.at.
Rösch & Handel is een merk van BANO Healthcare GmbH.

VERSIE VAN DE GEbruUKSAANvUJZING: JULI 2018

V11905

