

L'espace, Nordic Infucare AB

In- och utandningsventil	Ja.
Återkoppling vid inhalation	Nej.
Rengöring i hemmet	Handdisk eller diskmaskin. Ta isär bakstycke och mask men inte munstycket från cylindern. Kan kokas.
Rengöring i sjukvårdsmiljö	Spacern och maskerna ska diskas i diskdesinfektor. Ta isär bakstycke och mask men inte munstycket från cylindern. Klarar upp till 121 grader.
Hållbarhet i hemmet	Tolv månader.
Hållbarhet i sjukvårdsmiljö	Tolv månader. Bör okulärbesiktigas löpande för att se att material och ventiler ej är skadade.
Finns flera varianter av andningsbehållare?	Ja.
Mask eller munstycke	Förskrivs med eller utan mask.
Maskstorlekar	Extra masker/tillbehör för förskrivning. 0–2 år mask 2–6 år mask +6 år mask.
Användarvänlighet	Observera att fästet för mask respektive munstyckedelen är olika beroende på om mask används eller inte (se bild nedan) Spacern behöver bytas ut när man vill gå över till att inhalera. utan mask.

