

Able Spacer, Birk Nordic Pharma Consulting AS

In- och utandningsventil	Ja, tydlig.
Återkoppling vid inhalation	Ljud (visselpipa) på mask (small och medium) som ljuder när patienten andas in korrekt (tyst om för långsamt eller för fort). Ljudet kan kopplas till en gratis app – Rafitone – så inhalationerna kan göras till en lek/spel.
Rengöring i hemmet	Diskmedel och ljummet vatten. Tål inte maskindisk.
Rengöring i sjukvårdsmiljö	Kan ej rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor, rekommenderas ej för sjukvårdsmiljö.
Hållbarhet i hemmet	Tolv månader.
Hållbarhet i sjukvårdsmiljö	Kan ej rengöras eller desinfekteras i diskdesinfektor, rekommenderas ej för sjukvårdsmiljö.
Finns flera varianter av andningsbehållare?	Nej.
Mask eller munstycke	Mask förskrivs separat.
Användarvänlighet	Enkel att ta isär och sätta ihop. Ventilen öppnar sig vid mycket låga flöden.
Maskstorlekar (kan beställas separat)	Barnmask 0–3 år Barnmask 3+ år Large.

