

AeroChamber plus Flow-Vu, Chiesi

In- och utandningsventil	Ja, tydlig.
Återkoppling vid inhalation	Ja, ljuder vid för snabb inandning.
Rengöring i hemmet	Handdisk eller diskmaskin max 70 grader.
Rengöring i sjukvårdsmiljö	Kan ej diskdesinfekteras i högre värme än 70 grader. Ej lämplig för sjukvårdsmiljö.
Hållbarhet i hemmet	Tolv månader.
Hållbarhet i sjukvårdsmiljö	Ej lämplig för sjukvårdsmiljö.
Finns flera varianter av andningsbehållare?	Ja. Olika varianter beroende på maskstorlek eller vuxen/barn.
Mask eller munstycke	Förskrivs med eller utan mask.
Maskstorlekar (sitter ihop med behållaren)	0–18 mån med mask. 1–5 år med mask Barn och ungdom utan mask Vuxen med liten mask Vuxen med stor mask Vuxen utan mask.
Användarvänlighet	Enkel att ta isär och sätta ihop. Instruktion finns på behållaren.

