

Aer8 spacer, Aer Beatha AB

In- och utandningsventil	Nej.
Återkoppling vid inhalation	Nej.
Rengöring i hemmet	Av kartong, behövs inte.
Rengöring i sjukvårdsmiljö	Engångsprodukt.
Hållbarhet i hemmet	30 dagar.
Hållbarhet i sjukvårdsmiljö	Engångsprodukt.
Finns flera varianter av andningsbehållare?	Nej.
Mask eller munstycke	Ingen mask.
Maskstorlekar	Finns ej.
Användarvänlighet	Inget tydligt munstycke. Spraydosen bör inhaleras med ett djupt andetag. Tidalning fungerar inte. Bör därför inte användas till mindre barn. Mask går heller inte att ansluta.

