

OptiChamber Diamond, Philips

In- och utandningsventil	Ja, tydlig.
Återkoppling vid inhalation	Ljud uppstår när för kraftig inandning sker.
Rengöring i hemmet	Rengör kammaren och mask en gång per vecka. Lägg kammare i diskmedel och ljummet vatten rör om en min låt sedan ligga i 10 min. Mask i 2 minuter. Skölj av. Lufttorka. Tål ej diskmaskin.
Rengöring i sjukvårdsmiljö	Kan inte autoklaveras eller kokas, ej diskdesinfektor. Går att desinfektera i väteperoxid. OBS! Gäller ej masker! Andra masker passar inte till spacern.
Hållbarhet i hemmet	Tolv månader.
Hållbarhet i sjukvårdsmiljö	Tolv månader vid desinficering med väteperoxid (gäller endast spacern).
Finns flera varianter av andningsbehållare?	Nej.
Mask eller munstycke	Mask förskrivs separat.
Maskstorlekar (kan beställas separat)	Small (0–18 mån) Medium (18 mån–5 år) Large (5 år–vuxna).
Användarvänlighet	Kan vara svår att ta isär i samband med rengöring vid nedsatt handstyrka.

