

Dispozable spacer

In- och utandningsventil	Nej.
Återkoppling vid inhalation	Nej.
Rengöring i hemmet	Av kartong, behövs inte.
Rengöring i sjukvårdsmiljö	Av kartong, behövs inte. Engångsprodukt.
Hållbarhet i hemmet	Upp till en vecka.
Hållbarhet i sjukvårdsmiljö	Engångsprodukt.
Finns flera varianter av andningsbehållare?	Nej.
Mask eller munstycke	Ingen mask. Tydligt munstycke.
Maskstorlekar	Finns ej.
Användarvänlighet	Tydligt munstycke. Spraydosen bör inhaleras med ett djupt andetag. Tidalandning fungerar inte. Bör därför inte användas till mindre barn. Mask går heller inte att ansluta. Kan ej användas till sprayer med runt munstycke/fattning.

